

CAROSPEED®

Systeme manuel
d'accélérateur
et de frein




 **auto**
ADAPT
for your independence

DES INVENTIONS QUI FACILITENT LA VIE

Le plaisir de conduire

Carospeed est un système manuel d'accélérateur et de frein pour les conducteurs ne pouvant pas utiliser les pédales du véhicule. Les fonctions d'accélérateur et de frein sont transmises aux pédales via un levier placé à côté du siège conducteur. On accélère en tirant le levier vers l'arrière et l'on freine en le poussant vers l'avant, tout simplement. Carospeed fournit au conducteur les mêmes sensations d'accélération et de freinage qu'un véhicule à pédales. Le secret réside dans la conception de ce levier et notre expérience en matière d'adaptation des automobiles aux personnes invalides.

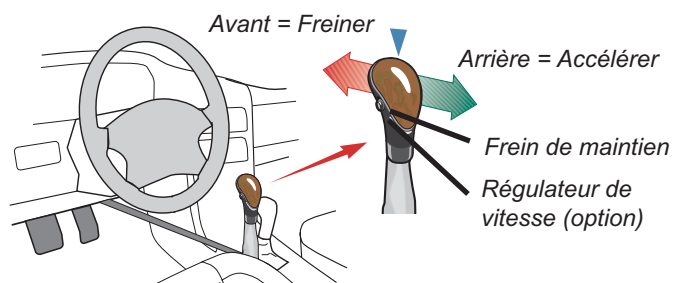

Frein de maintien en standard

Carospeed est équipé en standard d'un système qui maintient le véhicule immobile pendant que la main se déplace vers le levier de vitesse ou le frein à main.

Régulateur de vitesse

Pour éviter de garder la main sur l'accélérateur lors des longs trajets, le régulateur de vitesse de la voiture peut être connecté à Carospeed.

Le régulateur de vitesse est activé avec le même bouton que le frein de maintien et automatiquement désactivé dès que l'on freine.

Design ergonomique

Conçu dans un souci d'ergonomie, Carospeed est l'aboutissement de plusieurs années d'expérience en matière de design et de fabrication d'équipements automobiles pour les personnes invalides. Nos objectifs étaient de fournir une installation aussi simple et sûre que possible, de préserver les sensations de conduite et de créer une esthétique qui se fond à l'intérieur de la voiture.



Carospeed est un système manuel universel qui peut équiper la plupart des véhicules, qu'ils se conduisent à droite ou à gauche, quelle que soit leur taille. Carospeed est fixé aux fixations avant du siège conducteur et connecté aux pédales d'accélérateur et de frein.

CAROSPEED®

Blocage du frein et régulateur de vitesse.



CAROSPEED®



Poignée noire et revêtement gris autour du levier.




Poignée noire/bois et revêtement gris autour du levier.

luire !



Les modifications sont minimes et l'équipement peut être facilement démonté lorsque l'on change de véhicule. Carospeed est utilisé avec les véhicules à boîte automatique.

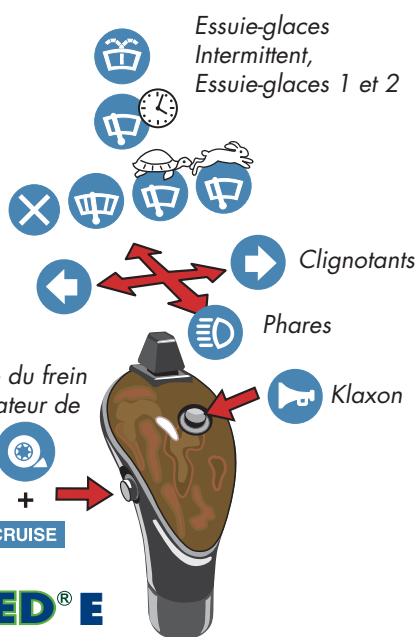

CAROSPEED® E



is et revêtement
ier.



Poignée en T cylindrique en mousse ou de forme asymétrique.

Priorité à la sécurité

Carospeed a obtenu le label CE et est conforme aux normes de sécurité de tous les grands constructeurs automobiles. Carospeed porte l'agrément e5 valable au sein de l'Union Européenne (95/54/EC).



Carospeed doit être installé par des techniciens spécialisés formés par un revendeur Autoadapt agréé.

Le produit est livré avec des instructions de montage détaillées et un manuel d'utilisation.

CAROSPEED® T

CAROSPEED® TE



Carospeed **T** (Standard) et **TE** (à fonctions électriques) sont des poignées en forme de T légèrement inclinées qui permettent au conducteur de reposer sa main dans une position ergonomique.

Carospeed **T** et **TE** sont toujours livrées avec 2 modèles de poignées : une en mousse de forme cylindrique et une de forme asymétrique.


CAROSPEED® INDICATOR

Carospeed Indicator est doté d'une commande des clignotants (tourner à gauche et tourner à droite).

Le frein de maintien et la commande du régulateur de vitesse sont des fonctions standard. Carospeed Indicator existe en version poignée noire seulement.



Carospeed Indicator existe avec une poignée noire seulement.

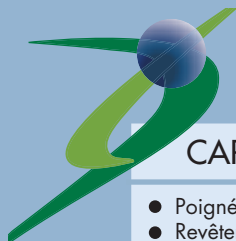

Caractéristiques du produit

CAROSPEED	CAROSPEED E	CAROSPEED T	CAROSPEED TE
<ul style="list-style-type: none"> ● Poignée noire ● Revêtement gris ● Frein de maintien ● Régulateur de vitesse (en option) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Poignée noire ● Revêtement gris ● Frein de maintien ● Régulateur de vitesse (en option) ● Fonctions électriques 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 types de poignée ● Revêtement gris ● Frein de maintien ● Régulateur de vitesse (en option) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 types de poignée ● Revêtement gris ● Frein de maintien ● Régulateur de vitesse (en option) ● Fonctions électriques
<ul style="list-style-type: none"> ● Poignée noire/bois ● Revêtement gris ● Frein de maintien ● Régulateur de vitesse (en option) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Poignée noire/bois ● Revêtement gris ● Frein de maintien ● Régulateur de vitesse (en option) ● Fonctions électriques 	CAROSPEED INDICATOR	
		<ul style="list-style-type: none"> ● Poignée noire ● Revêtement gris ● Frein de maintien 	<ul style="list-style-type: none"> ● Commande des clignotants ● Régulateur de vitesse (option)

Est conforme aux normes suivantes: ISO/TC22N2072, 74/60/EEC, 78/632/EEC, 95/54/EC, VVFS1994:5

Accessoires

BOULE DE VOLANT
Facilite la manœuvre du volant d'une seule main.

RÉGULATEUR DE VITESSE
Si la voiture est équipée d'un régulateur de vitesse, il peut être activé à l'aide de Carospeed.

ACCOUDOIR
L'accoudeur soulage le bras qui utilise une commande manuelle.

PROTECTION DE PÉDALES
Il est possible de commander une protection de pédales démontables qui permet d'éviter que les pieds ne glissent sous les pédales.

CONSOLE DE MONTAGE
La console de montage de Carospeed est fixée aux fixations avant du siège. Il existe des consoles adaptées à certaines marques de voitures.

Pour
davantage
d'information:
www.autoadapt.fr



Autoadapt AB

Åkerivägen 7
S-443 61 Stenkullen, Suède
Tél: +46(0)302 25400
Fax: +46(0)302 25404
E-mail: contact@autoadapt.se
www.autoadapt.fr

