

TILDATM

fait basculer le fauteuil et permet d'entrer et de sortir encore plus facilement de la voiture



Les pieds sont en place sur le repose-pied et n'ont pas besoin d'être déplacés.



Tilda associé à Carony.

Fait basculer le fauteuil sur trois positions


TILDA peut être associé avantageusement avec la plaque pivotante TURNOUT et permet d'entrer encore plus facilement dans la voiture.

Avec les pieds en place sur le repose-pied, on n'a pas besoin de lever les jambes par-dessus le longeron latéral quand on pivote le fauteuil pour le faire entrer dans la voiture.

Associé à CARONY, TILDA laisse plus de place pour la tête au moment de faire passer le fauteuil de la structure Carony à la plaque pivotante de la voiture.

 auto
ADAPT
for your independence

DES INVENTIONS QUI FACILITENT LA VIE

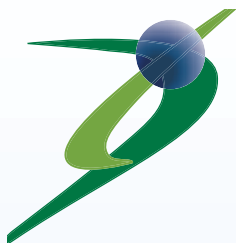


TILDA™

TILDA est spécialement conçu pour être associé à :
la plaque pivotante TURNOUT qui permet de faire pivoter le fauteuil de la voiture au-dessus du longeron latéral.
et
CARONY, qui permet de faire coulisser le fauteuil, depuis la plaque pivotante de la voiture vers une structure de fauteuil roulant.
ou
Des rails couissants Scheelman, qui permettent également de régler le fauteuil en longueur à l'intérieur de la voiture.

Le repose-pieds est disponible en option.



*Tilda sur la position 3 et en combinaison avec la plaque pivotante TURNOUT, avec les rails Carony montés sur les côtés.
Le repose-pieds est disponible en option*

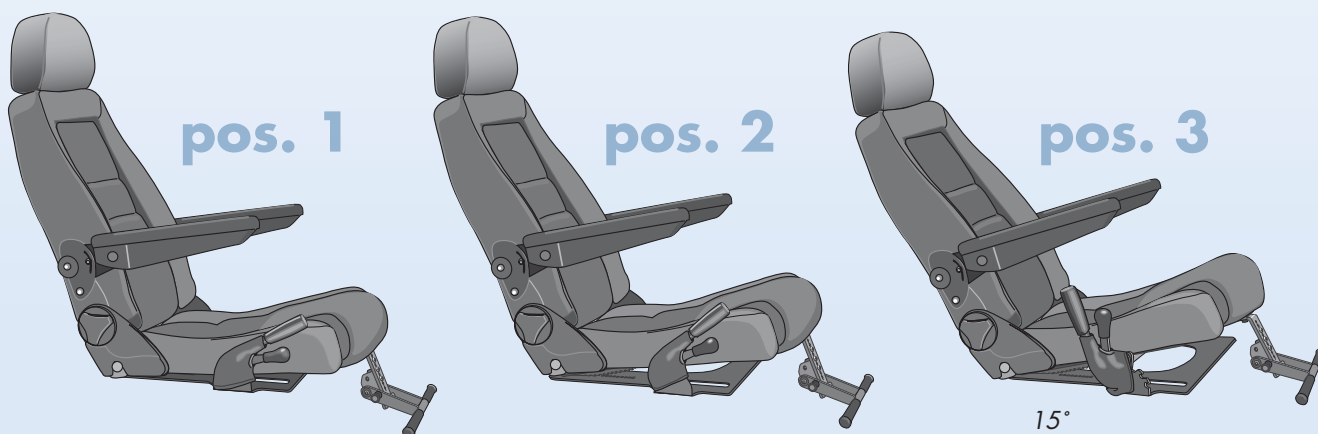

Quand on saisit les deux poignées, les blocages se libèrent et le fauteuil peut être redressé.

Testé en collision

Avec le fauteuil basculé sur la position 1, le voyage en voiture est plus confortable et la position assise soulage mieux.
Testé en collision sur la pos. 0 (position redressée) et sur la pos. 1.

TILDA est conforme aux normes et directives suivantes :
74/60/EEC - 2000/4/EG, 74/408/EEC - 2005/39/EEC
93/42/EEC, 95/28/EG, ECE R-17, ECE R-21,
SS-EN 12182, ISO 3795, FMVSS 201, 207, 208 et 302

Poids max. de l'utilisateur : 150 kg.
Hauteur sous le siège : 24 mm
Largeur : 520 mm

auto
ADAPT
for your independence

Autoadapt AB, Åkerivägen 7, S-443 61 Stenkullen, Suède
Tél : +46 302 25400 E-mail : contact@autoadapt.se
www.autoadapt.fr